



Získání vzorku z nosohltanu

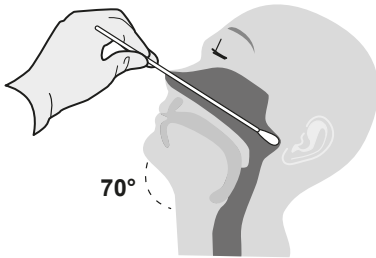

1. Pro výtěr použijte sterilní tampon dodávaný v sadě. Zakloňte hlavu pacienta v úhlu zhruba 70°. Pro výtěr z nosohltanu opatrně zasuňte tampon do nosní dírky, která při vizuální kontrole vykazuje nejvíce sekrece. Jemným otáčením zasuňte tampon na patro (ne nahoru), dokud nenarazíte na odpor.

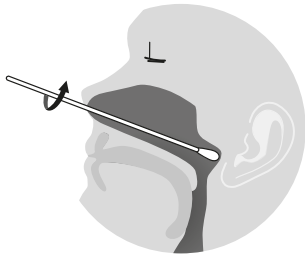


2. Jemně tampon při současném otáčení otírejte o zadní stěnu nosohltanu.
3. Tampon pomalu za současného otáčení vyjměte.


Získání vzorku z přední části nosu

Ačkoliv jsou nasofaryngeální vzorky zlatým standardem pro získání vzorku pro testování na COVID-19, vzorky z přední části nosu jsou doporučenou alternativou, když nemůže být nasofaryngeální vzorek získán. Vzorky z přední části nosu jsou akceptovatelnou alternativou, ačkoliv vykazují mírně nižší senzitivitu ve srovnání s nasofaryngeálními vzorky pro testování na COVID-19 během prvních 5 dní od objevení symptomů. Ve srovnání s nasofaryngeálními vzorky je získání vzorků z přední části nosu jednodušší, což zvyšuje celkovou dostupnost testování na COVID-19.

Je důležité si uvědomit, že žádný test nenabízí 100% senzitivitu při detekci COVID-19. Negativní výsledek testu by měl být posouzen v kontextu s dalšími informacemi, které se týkají příznaků a symptomů u pacienta a jeho možné expozici viru.

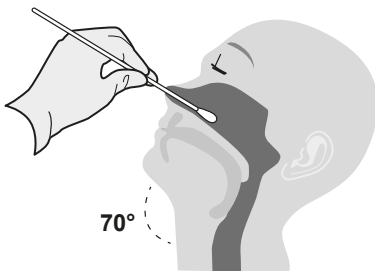

1. Použijte sterilní tampon dodávaný v sadě, abyste odebrali vzorek z přední části nosu.
2. Zakloňte hlavu pacienta zhruba do úhlu 70°.

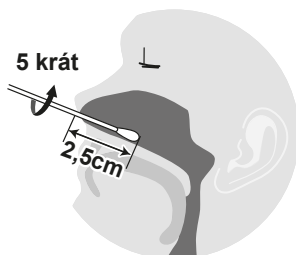

3. Jemně vložte celou absorpční část tamponu do jedné nosní dírky pacienta. Tampon by měl být zasunut až 2,5 cm od kraje nosní dírky a vzorek by měl být získán rotací tamponu při jeho současné rotaci proti dutině nosní a to nejméně 5x. Ujistěte se, že se tampon při jeho rotaci dotýká dutiny nosní. Odebrání vzorku by mělo trvat zhruba 15 sekund.
4. Vyjměte tampon z nosní dírky.
5. Stejným tamponem odeberte vzorek z druhé nosní dírky – opakujte přitom postup v bodě 3 a 4. Je důležité odebrat vzorek z OBOU nosních dírek, a to stejným tamponem.
6. Po získání vzorku začněte neprodleně s vyhodnocením. Nevkládejte tampon zpět do balení poté, co provedete odběr vzorku.

<p>1</p> <p>Přidejte 10 kapek (asi 500 µl) extrakčního pufru do extrakční zkumavky.</p>	<p>2</p> <p>Ponořte vzorek do extrakční zkumavky. Otočte tamponem alespoň deset až dvacetkrát (10 - 20x) a přitom stlačujte tampon na dno a boční stěny zkumavky.</p>	<p>3</p> <p>Nechte tampon v extrakční zkumavce po dobu 30 sekund.</p>	<p>4</p> <p>Při vyjmutí točte hlavičkou tamponu a tiskněte ji k vnitřku extrakční zkumavky nejméně pět až desetkrát (5-10x) a stlačte stěny zkumavky tak, aby se tekutina z tamponu vymačkala. Použitý tampon zlikvidujte jako biologický odpad.</p>
<p>5</p> <p>Nasadte uzávěr a pevně ho zatlačte do zkumavky.</p>	<p>6</p> <p>Odkapejte 3-5 kapek (100 µL) zpracovaného vzorku do jamky na vzorek na testovací kazetě.</p>	<p>7</p> <p>Vyhodnocení testu je možné za 15-20 minut. Některé pozitivní výsledky se mohou objevit dříve. POZOR: Nečtěte výsledek po více než 20 minutách. Výsledky mohou být nesprávné.</p>	

Vyhodnocení testu

<p>Pozitivní</p>	<p>+ Pozitivní výsledek</p> <p>Na kazetě jsou dva barevné proužky. Jak testovací, tak kontrolní proužek je na kazetě přítomen. Přítomnost slabého testovacího proužku, který se objeví během testovacího okna, by měla být považována za pozitivní výsledek.</p>
<p>Negativní</p>	<p>- Negativní výsledek</p> <p>Je přítomen pouze kontrolní proužek. Absence testovacího proužku indikuje negativní výsledek.</p>
<p>Neplatný test</p>	<p>× Neplatný výsledek</p> <p>Kontrolní proužek by měl být vždy přítomen nezávisle na výsledku testu. Pokud se kontrolní proužek neobjeví, opakujte test s novou testovací kazetou.</p>